


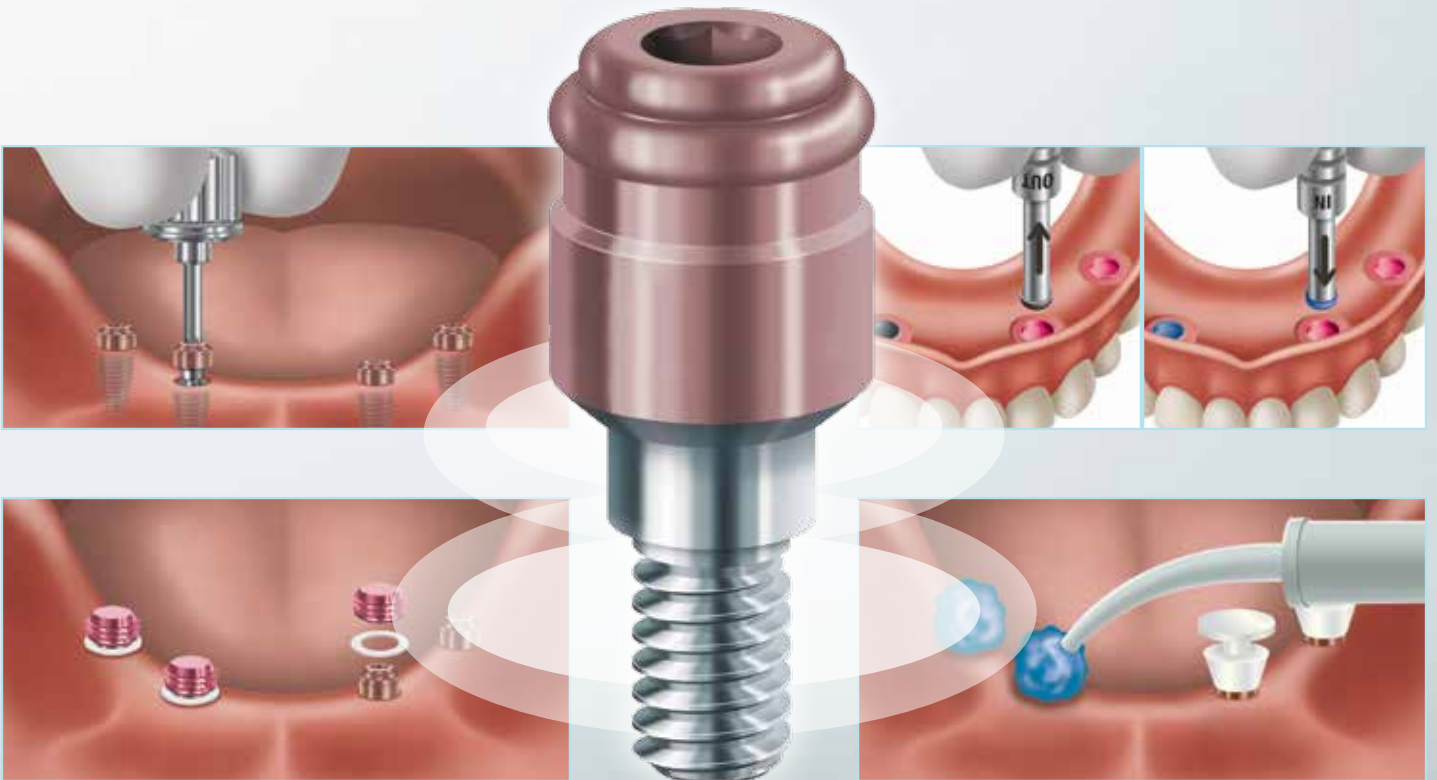

LOCATOR R-Tx™
REMOVABLE ATTACHMENT SYSTEM

LOCATOR R-Tx™

MANUAL TÉCNICO



ÍNDICE DEL CONTENIDO

Manual técnico del Sistema de Ataches removible LOCATOR R-Tx™

- 1 ÍNDICE DEL CONTENIDO
- 2 REFERENCIA DE LOS COMPONENTES PARA LOCATOR R-TX
- 3 LOCATOR R-TX
 - 3 La siguiente generación del líder mundial del sistema de ataches para sobredentaduras
 - 4 Panorámica de las características del sistema
- 7 POSICIONAMIENTO DEL ABUTMENT
- 8 PROCESADO DEL ATACHE DE LA COFIA EN LA SOBREDENTADURA
 - 8 Técnica directa
 - 11 Técnica indirecta
- 15 MANTENIMIENTO DEL LOCATOR R-TX
 - 15 Rebase de la sobredentadura anclada en implantes con soporte mucoso
- 18 INFORMACIONES IMPORTANTES SOBRE EL SISTEMA DE ATACHE LOCATOR R-TX
 - 18 Indicaciones
 - 18 Contraindicaciones
 - 18 Dispositivos desechables
 - 18 Instrumento para la inserción de las retenciones
 - 18 Limpieza
 - 18 Esterilización
- 19 DIRECTRICES PARA LA INSERCIÓN, ELIMINACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SOBREDENTADURA
 - 19 Posicionar y quitar las sobredentaduras
 - 19 Limpieza de las sobredentaduras
 - 19 Precauciones adicionales
- 20 RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO DEFECTUOSO Y GARANTÍA

IMPORTANTE: Este documento sirve como directriz para aquellos odontólogos que quieran usar los productos ZEST Anchors. No sustituye de ninguna manera la preparación profesional ni la experiencia. Para mayor información, consultar las instrucciones de uso.

REFERENCIA DE LOS COMPONENTES PARA LOCATOR R-TX™

ABUTMENT LOCATOR R-Tx



PROCESADO

Transfer
de impresión
30017
(QTY. 4)



Análogo
ø 3.35 mm
30014
(QTY. 4)



Análogo
ø 4.00 mm
30015
(QTY. 4)



Análogo
ø 5.00 mm
30016
(QTY. 4)



Cofia separadora
30018
(QTY. 4)



Cofia
30013
(QTY. 4)



Anillo distanciador
08514
(QTY. 20)



RETENCIONES

Retención
CERO
30001
(QTY. 4)



Retención
BAJA
30002
(QTY. 4)



Retención
MEDIA
30003
(QTY. 4)



Retención
ALTA
30004
(QTY. 4)



Retención
EXTRA
30005
(QTY. 4)



INSTRUMENTOS

Instrumento de inserción para retenciones
30021



LOCATOR R-Tx™

La siguiente generación del líder mundial del sistema de attaches para sobredentaduras

Descubrimos el LOCATOR R-Tx, un sistema mejor, más simple y más duro que se basa en la misma técnica que el galardonado LOCATOR.

En Zest Anchors, afirmamos con orgullo un patrimonio de 40 años de innovación en los attaches para sobredentaduras.

Durante los últimos quince años, el Sistema de attaches LOCATOR, ha experimentado un crecimiento espectacular, siendo el líder indiscutible del mercado de los attaches para sobredentaduras implanto-soportadas y muco-soportadas.

Se ha ganado la confianza tanto del sector, como de la comunidad médica y de los pacientes.

Manteniendo nuestro espíritu innovador, Zest ha continuado refinando e incluso reimaginando el LOCATOR.

Comenzamos por escuchar a los especialistas, clínicos y fabricantes.

Entonces, nuestros ingenieros han desarrollado estas ideas y las han puesto en práctica.

Bienvenido al LOCATOR R-Tx.



LOCATOR R-TX™

Panorámica de las características del sistema

ABUTMENT

1 Doble retención externa y porción coronal más estrecha, para facilitar la colocación de la sobredentadura.




2 Instrumento de inserción estándar hexagonal 050"/1.25 mm.

3 Recubrimiento DuraTec™: de Nitruro de Titanio y Carbono estético, más duro y más resistente al desgaste.

COFIA DEL ATACHE DENTAL / RETENCIONES

1 Incremento del 50% de la capacidad pivotante, hasta 60° entre implantes.

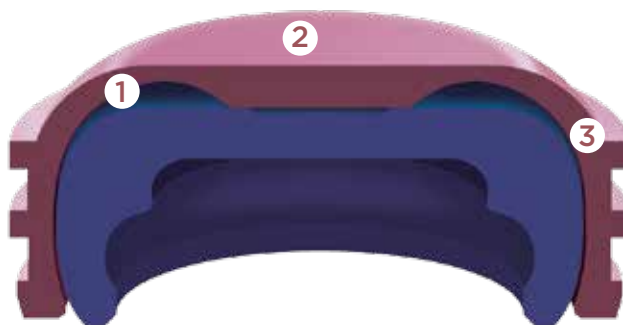

2 Anodizado rosa que mejora la estética.



3 Surcos horizontales y planos para oponer resistencia a los movimientos verticales y rotacionales.

1 POSICIONAMIENTO MÁS SENCILLO DE LA SOBREDENTADURA GRACIAS A LA TECNOLOGÍA PIVOTANTE



La genialidad del sistema LOCATOR consiste en la capacidad de la retención de nylon de pivotar dentro de la cofia del atache dental, consiguiendo un sistema resiliente que permite a los pacientes asentar su prótesis sin dañar los componentes, incluso cuando hay divergencia entre los implantes.


Las modificaciones patentadas en la cofia del atache dental permiten ahora, que las retenciones del Locator R-Tx pivoten hasta 30° para tratar un máximo de 60° de divergencia entre implantes, eliminando la necesidad de abutments pre-angulados.

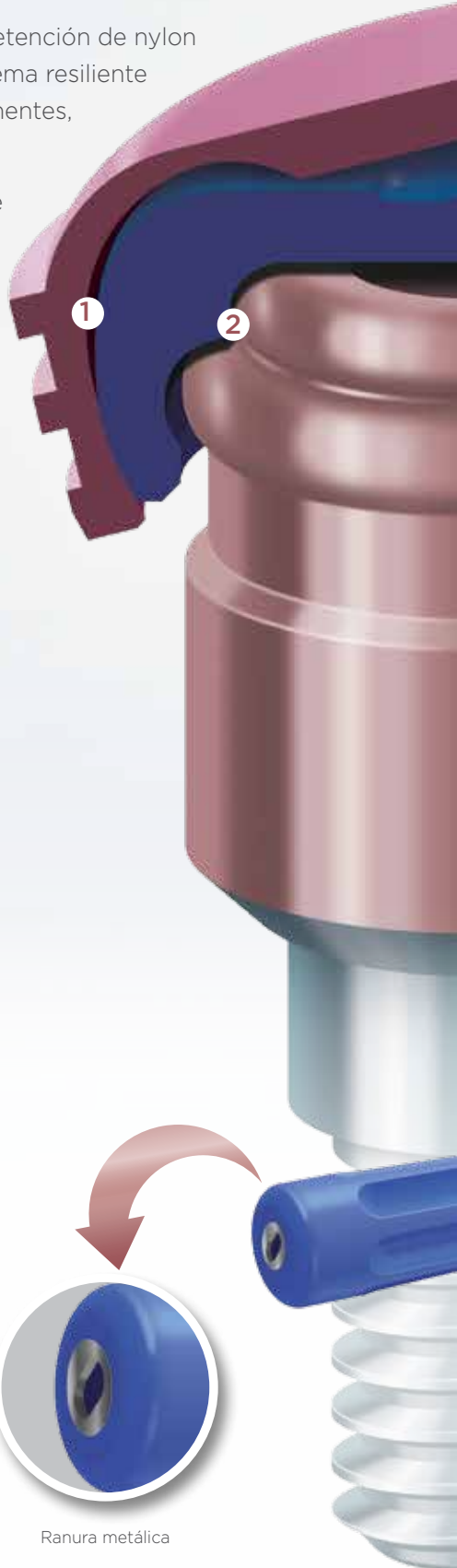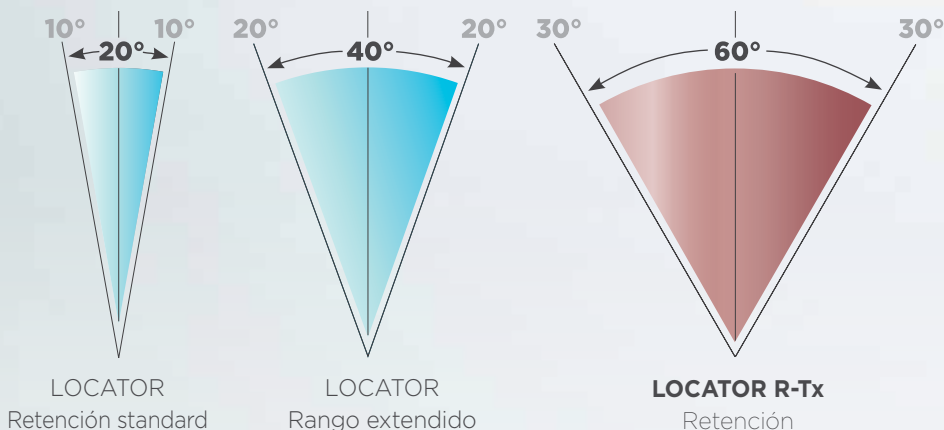


2 DISEÑO CORONAL MÁS ESTRECHO



La doble retención del abutment con la parte superior más estrecha ofrece un efecto de cono que permite al paciente una mayor facilidad de alineamiento y la adecuada colocación de la prótesis.

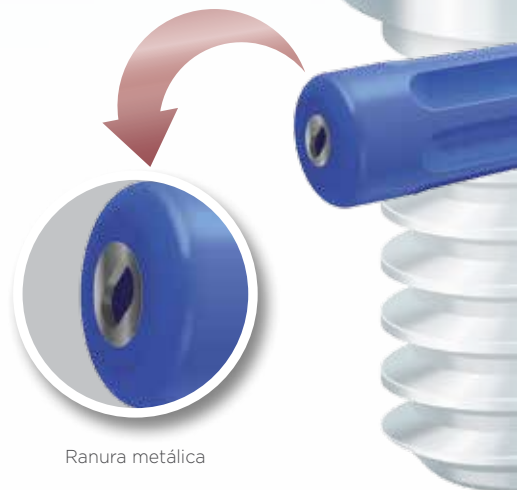

Ranura metálica

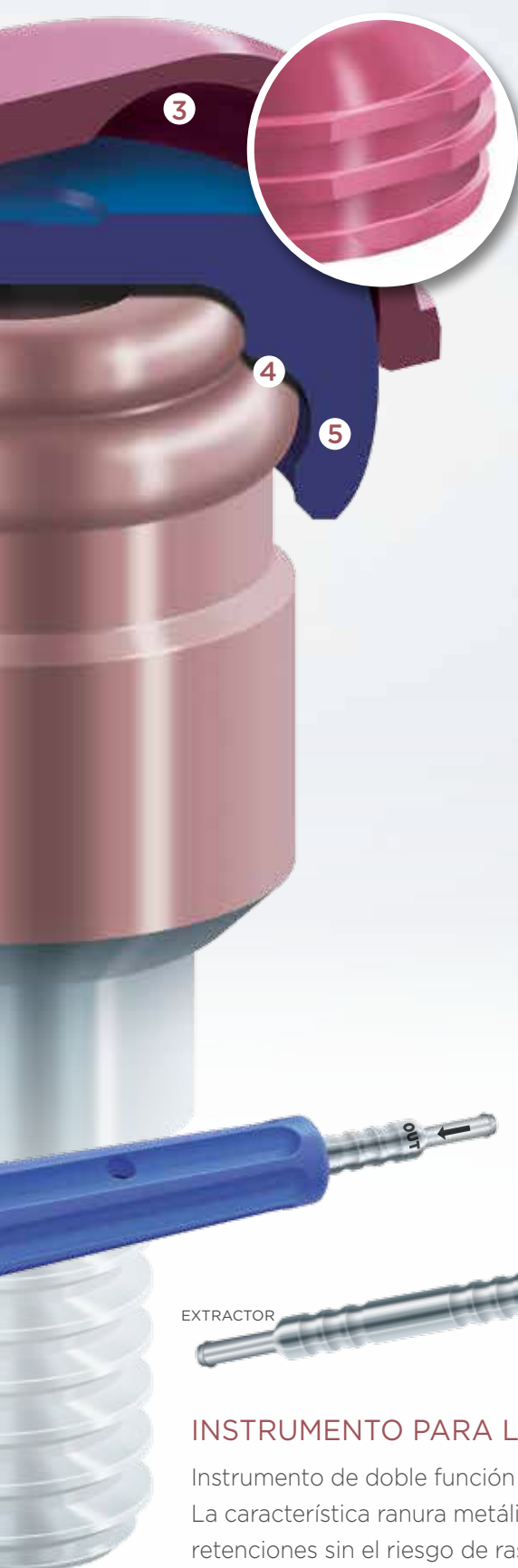

3 PRÁCTICO DISEÑO DE LA COFIA DEL ATACHE DENTAL



Surcos horizontales y planos para oponer resistencia a movimientos verticales y rotacionales, y el canal de la parte superior de la cofia, aumentan el rango de pivotación. El nuevo anodizado rosa mejora la estética en las zonas de acrílico fino.

4 RETENCIONES EFICACES

Las retenciones de Nylon, ahora ofrecen retención dual en la parte exterior del abutment. El no tener parte interna, previene de restos de alimentos y acumulación de placa en el mecanismo, mejorando la fijación de la sobredentadura.

5 NUEVO DISEÑO DE LAS RETENCIONES

El diseño mejorado de las retenciones ofrece características de doble retención externa. La simplicidad ha sido la máxima preocupación -el sistema utiliza únicamente un Set de retenciones con unos sencillos valores de retención- Cero, Bajo, Mediano, Alto.



CERO



BAJO



MEDIO



ALTO

6 PRÁCTICO PACKAGING TODO-EN-UNO



Práctico diseño Todo-en-uno, de doble vial confrontado que contiene el abutment y los componentes de procesado, proporcionando todos los componentes para una referencia.



EXTRACTOR

INSERTADOR


INSTRUMENTO PARA LAS RETENCIONES “INSERT TOOL”

Instrumento de doble función para insertar y extraer las retenciones del Locator R-Tx.

La característica ranura metálica de la parte posterior de la herramienta, permite desacoplar las retenciones sin el riesgo de rasgar los guantes.

LOCATOR R-Tx™

Posicionamiento del abutment

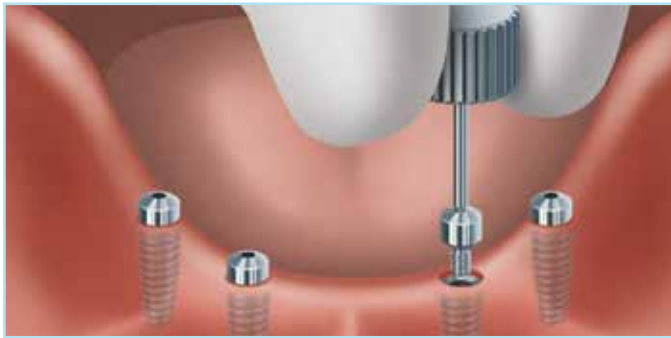

1 Identificar el sistema y el diámetro de cada implante. Retire los pilares de cicatrización.



2A-2B Con la ayuda de una sonda periodontal, mida la altura de encía en el punto más alto y seleccione el abutment LOCATOR R-Tx correspondiente a la altura medida. Así, si la altura medida es, por ejemplo, de 3 mm, pida el LOCATOR R-Tx de 3 mm. En todos los casos el abutment tiene 2 mm más de altura para acomodar la cápsula que contiene las retenciones.



3 Posicione el abutment LOCATOR R-Tx en el implante con un destornillador hexagonal de .050"/1.25 mm, apretando manualmente. Verifique con radiografías cada interfase para confirmar que están completamente asentados.



4 Complete el asentado del abutment R-Tx utilizando una llave de torque calibrada. Apriete el LOCATOR R-Tx a un torque de 30 Ncm.

Es posible insertar la cofia usando tanto un método directo como uno indirecto.

Consultar la página 8 para ver el método directo y la página 11 para los procedimientos con método indirecto para el sistema de anclaje removible LOCATOR R-Tx.

LOCATOR R-TX™


Procesado de la cofia del atache - Técnica Directa




1 Coloque los anillos blancos espaciadores alrededor de cada abutment y presione hasta el tejido. A continuación inserte las cofias que contienen la retención de procesado negra, presionando firmemente.



2 Aplique el material de impresión en la superficie de la sobredentadura y posesiónela en boca, sobre las cofias. Esto marcará las zonas que deberán aliviarse para permitir la rehabilitación de las cofias.

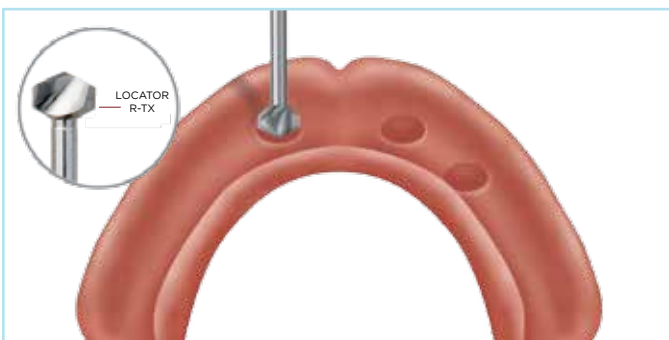

3 Alivie las áreas marcadas con una fresa de forma idónea. ZEST recomienda una ligera presión y un pequeño movimiento de balanceo para empezar el fresado, seguido de un movimiento vertical hacia abajo para preparar el hueco adecuado.

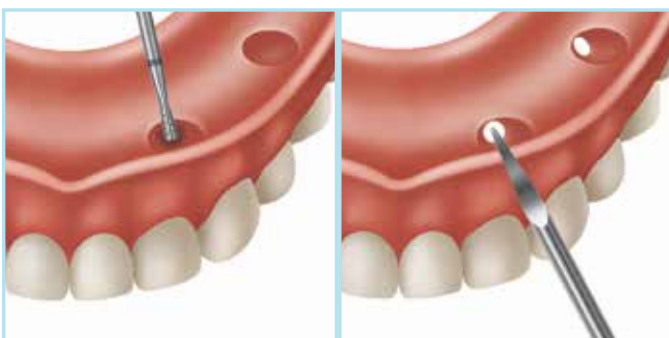

4A-4B Corte una muesca alrededor de la circunferencia de las áreas aliviadas. Practique un orificio lingual/palatino en la prótesis con la fresa idónea para eliminar el exceso de material.

LOCATOR R-Tx™

Procesado de la cofia del atache - Técnica Directa (continuación)



5 Seque las cofias. Deposite una pequeña cantidad de resina charside alrededor de la circunferencia de cada cofia. Deposite material de procesado en las zonas aliviadas de la prótesis sobre las cofias y hacia el tejido. Haga que el paciente permanezca en ligera oclusión mientras el material solidifique. Consulte, por favor, las instrucciones de utilización para los tiempos de fraguado.

IMPORTANTE: una excesiva presión oclusal durante el proceso de solidificación, puede causar el replique del tejido contra la base de la prótesis y puede contribuir al desalajo y desgaste prematuro de las retenciones.



6 Desacople la prótesis y fuera de la boca, verifique el correcto procesamiento de las cofias. Rellene los espacios vacíos con resina charside y fotopolimerice con la lámpara. El material es auto y fotopolimerizable en 30 segundos con la aplicación de la luz. Elimine cualquier exceso de material con la fresa de forma idónea.




7 Elimine cualquier resto de acrílico de la prótesis y haga las modificaciones necesarias.



8 Acabe el pulido de la prótesis.

LOCATOR R-Tx™

Procesado de la cofia del atache - Técnica Directa (continuación)

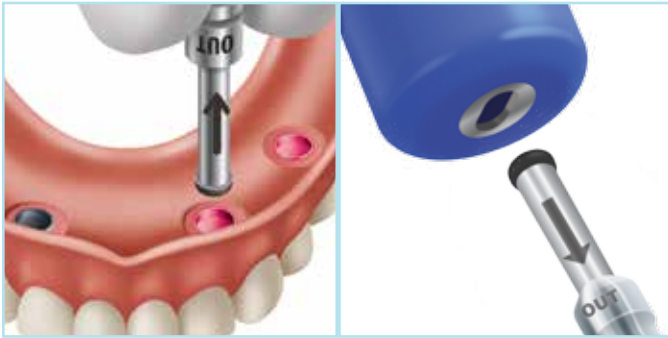

9A-9B Retire la retención negra de procesado de la cofia del atache utilizando el Extractor (OUT) del instrumento "Insert Tool". Cuando utilice el extractor, acóplelo en la retención e incline el instrumento hacia distal o mesial hasta sacarlo de la cofia.

Utilice la ranura metálica del extremo posterior de la herramienta para retirar la retención negra de la herramienta. Esto se puede lograr deslizando la retención en la abertura del metal y haciendo un movimiento hacia arriba.



10 Posicione la retención final seleccionada en cada cofia con el lado insertador (IN) del instrumento. Durante el periodo de adaptación utilice la retención más baja. Acóplelo en la retención con un ligero ángulo y después con una ligera presión vertical.



11 Coloque la sobredentadura al paciente, presionando para acoplar las retenciones en los abutments LOCATOR R-Tx. Verifique la oclusión. Explique al paciente cómo quitar y poner la prótesis. Si la retención no es satisfactoria, retire las retenciones y cámbielas por las de la superior fuerza de retención. Consulte en la sección de componentes los posibles niveles de retención.

Consultar la sección de los "Componentes de referencia" en la página 2 para ver los niveles de retención disponibles. Explique al paciente cómo realizar un mantenimiento cotidiano correcto y cuáles son los plazos para las visitas de control periódicas.

LOCATOR R-Tx™

Procesado de la cofia del atache - Técnica Indirecta




1 TÉCNICA INDIRECTA/PROCESO DE LABORATORIO

Se puede utilizar tanto una cubeta de impresión a medida como una individualizada. Compruebe que los huecos tengan la suficiente altura y diámetro de los transfers de impresión de LOCATOR R-Tx.



2 Coloque unos transfers de impresión en los abutments y presione firmemente. Utilice el material de impresión de dureza media. Llene la cubeta de impresión y colóquela encima de los transfers y sobre el tejido. Deje que el material endurezca y retire la impresión.

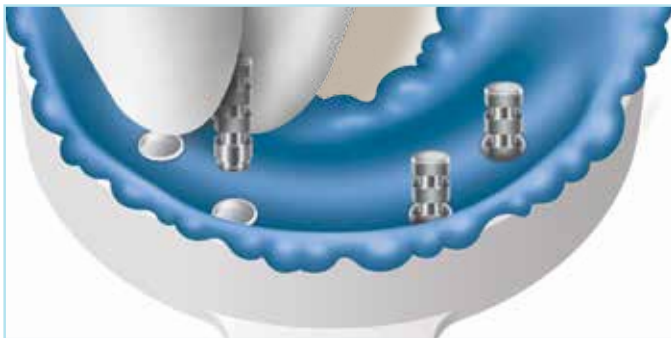


3 Coloque los análogos LOCATOR R-Tx del diámetro adecuado en cada transfer y envíe la impresión al laboratorio.

LOCATOR R-Tx™

Procesado de la cofia del atache - Técnica Indirecta



4 Verifique que los análogos estén bien posicionados en las cofias para la toma de impresión y vacíe el modelo.

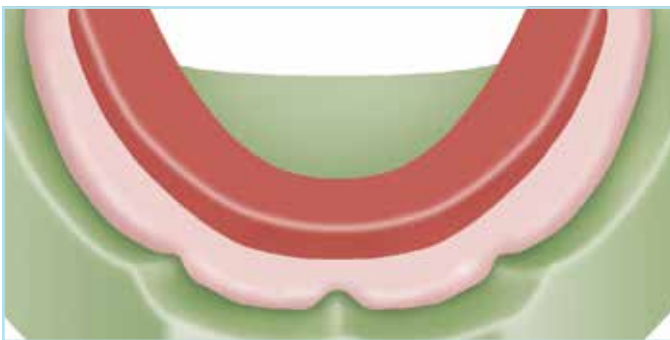

5 Prepare la base de la sobredentadura de cera sobre el modelo para la prueba del registro de mordida. Las cofias con la retención negra pueden ser procesadas en la placa base para proporcionar estabilidad durante la fabricación del registro.



6 REGISTRO DE MORDIDA

Colóquelo en boca y registre la relación de la mordida. Tome una impresión de la arcada opuesta y vierta el fundido. Seleccione un tono para los dientes de la sobredentadura.



7 Posicione los modelos en el articulador y proceda a insertar los elementos dentales.

LOCATOR R-Tx™

Procesado de la cofia del atache - Técnica Indirecta (continuación)



8 PRUEBA DE PRÓTESIS


Coloque la prótesis de prueba en boca y verifique el ajuste, el correcto anclaje de los abutments, los parámetros estéticos, fonéticos y de oclusión.



9 Finalice la prótesis en resina. Cierre el procesado. Finalice la sobredentadura y lustrar.



10 **Paso opcional:** si el dentista prefiere insertar las cofias definitivas con la técnica directa se pueden utilizar espaciadores en la prótesis. El espaciador de procesado crea un rebaje en la prótesis que permite procesar las cofias sin contacto con el acrílico circundante.

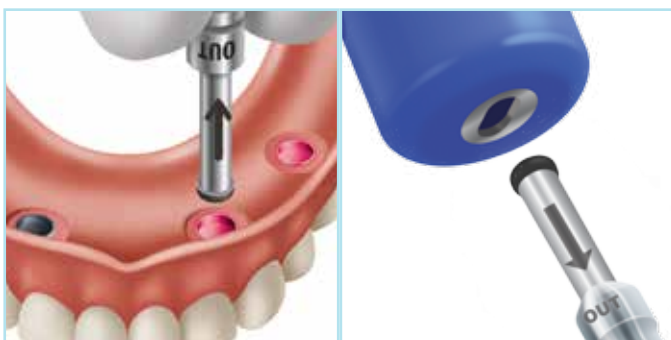


11A-11B Retire la retención negra de procesado de la cofia del atache utilizando el extractor (OUT) del instrumento "Insert Tool". Cuando utilice el extractor, acóplelo en la retención e incline el instrumental hacia distal o mesial hasta sacarlo de la cofia.

Utilice la ranura metálica del extremo posterior del instrumental para retirar la retención negra de la herramienta. Esto se puede lograr deslizando la retención en la abertura del metal y haciendo un movimiento hacia arriba.

LOCATOR R-Tx™

Procesado de la cofia del atache - Técnica Indirecta (continuación)

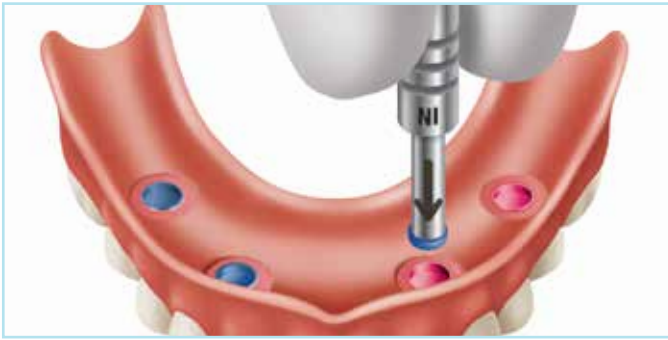

12 Posicione la retención final seleccionada en cada cofia con el insertador (IN) del instrumento. Durante el periodo de adaptación, utilice la retención más baja. Para usar el Insertador, acóplelo en la retención con un ligero ángulo y después con una ligera presión vertical.




13 ENTREGA DE LA PRÓTESIS

Coloque la sobredentadura en boca, presionando para acoplar las retenciones en los abutments LOCATOR R-Tx. Verifique la oclusión. Explique al paciente cómo quitar y poner la prótesis. Si la retención no es satisfactoria, retire las retenciones y cámbielas por las de la superior fuerza de retención. Consulte en la sección de componentes los posibles niveles de retención. Instruya al paciente acerca de los cuidados que debe tener en casa y de las visitas de revisión.

MANTENIMIENTO DEL LOCATOR R-Tx™ ABUTMENT

Rebase de la sobredentadura anclada en implantes con soporte mucoso

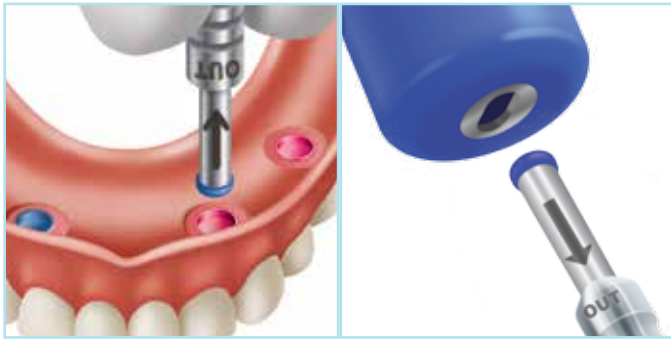

1A-1B Retire la retención negra de procesamiento de la cofia del atache utilizando el extractor (OUT) del instrumento "Insert Tool". Cuando utilice el extractor, acóplelo en la retención e incline el instrumental hacia distal o mesial hasta sacarlo de la cofia.


Utilice la ranura metálica del extremo posterior del instrumental para retirar la retención negra de la herramienta. Esto se puede lograr deslizando la retención en la abertura del metal y haciendo un movimiento hacia arriba.



2 Quite las cofias existentes insertadas en la sobredentadura usando una fresa perforadora.




3 Coloque los anillos blancos espaciadores alrededor de cada abutment y presione hasta el tejido. A continuación inserte las cofias que contienen la retención de procesamiento negra, presionando firmemente. Calce la sobredentadura para asegurarse de que cada hueco es bastante ancho para poder acoger la nueva cofia sin interferir con la resina.

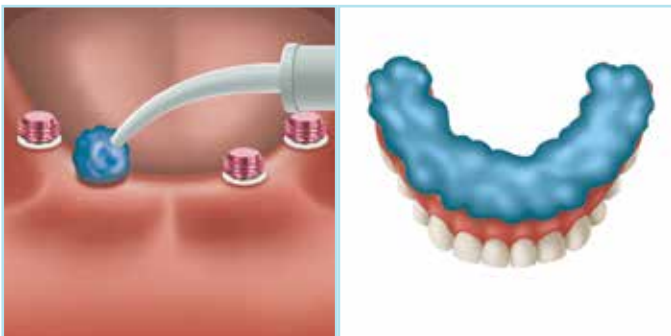


4A-4B Aplique adhesivo de impresión en la superficie interna de la sobredentadura y posicione material de impresión de viscosidad mediana. Tome la impresión y pida al paciente que cierre la boca con ligera oclusión. Quite la sobredentadura y verifique que todas las cofias se han englobado en el material de impresión.

MANTENIMIENTO DEL LOCATOR R-Tx™ ABUTMENT

Rebase de la sobredentadura anclada en implantes con soporte mucoso

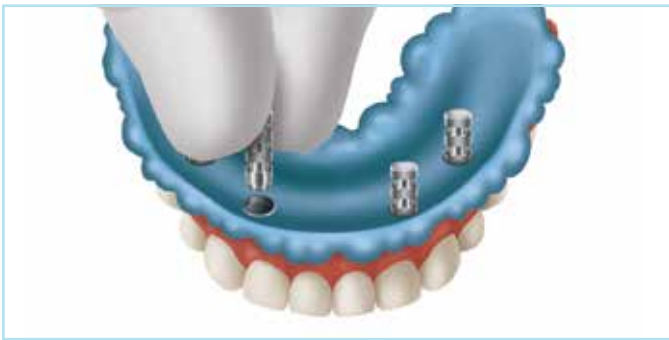

5 Posicione los análogos de los abutment LOCATOR R-Tx del diámetro apropiado en cada cofia y realice el modelo.

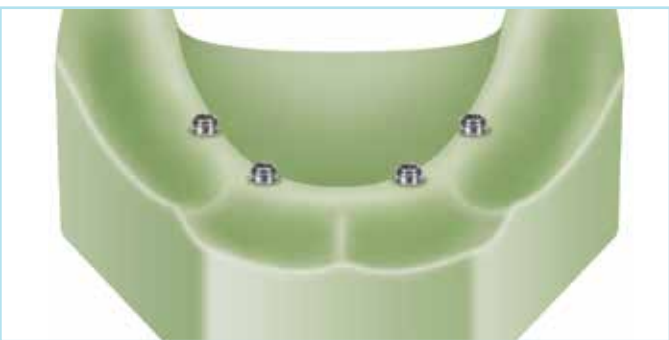

6 Verifique que los análogos están anclados en las retenciones y realice el modelo.



7 Coloque el modelo con la sobredentadura en el articulador.




8 Abra el articulador, quite el material de impresión de la sobredentadura. Vuelva a insertar la sobredentadura y las cofias en los análogos y rebase.

Quite la sobredentadura del articulador, acabe y abrillántela.


MANTENIMIENTO DEL LOCATOR R-Tx™ ABUTMENT

Rebase de la sobredentadura anclada en implantes con soporte mucoso (continuación)

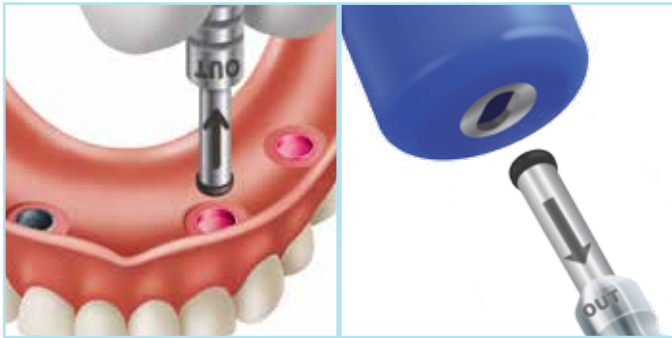

9A-9B Retire la retención negra de procesamiento de la cofia del atache utilizando el extractor (OUT) del instrumento "Insert Tool". Cuando utilice el extractor, acóplelo en la retención e incline el instrumental hacia distal o mesial hasta sacarlo de la cofia.

Utilice la ranura metálica del extremo posterior del instrumental para retirar la retención negra de la herramienta. Esto se puede lograr deslizando la retención en la abertura del metal y haciendo un movimiento hacia arriba.

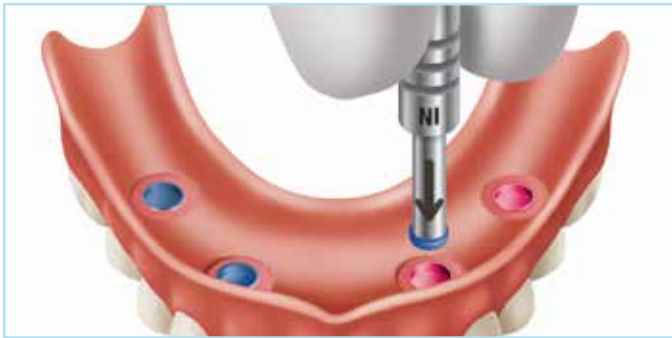

10 Posicione el retenedor que se ha seleccionado en cada cofia usando la extremidad de inserción (IN) del instrumento. Durante la fase de prueba, empezar seleccionando el retenedor con un grado de retención más bajo. Insertar el retenedor con un ligero ángulo y luego enderezar el instrumento y presionar hacia abajo.



11 ENTREGA DE LA PRÓTESIS

Posicione la sobredentadura y presionar hacia abajo para anclar los retenedores en los abutment LOCATOR R-Tx, y verificar la oclusión. Explicar al paciente cómo quitar y poner la sobredentadura. Si la retención no es buena, quitar los retenedores y sustituirlos con los que tienen el nivel de retención siguiente.

Consultar la sección "Componentes de referencia" en la página 2 para los niveles de retención disponibles. Explicar al paciente cómo realizar un mantenimiento cotidiano correcto y los plazos para las visitas de control periódicas.

INFORMACIONES IMPORTANTES SOBRE EL SISTEMA DE ATACHE REMOVIBLE LOCATOR R-TX™

INDICACIONES

El sistema de atache LOCATOR® R-Tx ha sido ideado para su uso con sobredentaduras o prótesis parciales, enganchadas total o parcialmente en implantes endo-óseos en la mandíbula o maxila.

CONTRAINDICACIONES

No está indicado en aquellos casos donde se necesita una conexión totalmente rígida. No está recomendado su uso en un implante individual con una divergencia superior a 30 grados respecto al eje vertical. No está indicado para una reconstrucción fija.

DISPOSITIVOS DESECHABLES

Los componentes del sistema de atache LOCATOR R-Tx, salvo el instrumento para la inserción de las retenciones, son dispositivos desechables. Los dispositivos desechables no se pueden volver a utilizar ni se pueden esterilizar otra vez.

INSTRUMENTO PARA LA INSERCIÓN DE LAS RETENCIONES LOCATOR R-TX

Este instrumento cuenta con dos extremidades para facilitar la inserción y la eliminación de las retenciones LOCATOR R-Tx. La típica hendidura de metal presente en la parte trasera del instrumento permite al dentista desenganchar las retenciones. Este instrumento ha sido ideado para numerosos usos. Si el instrumento se llegara a desgastar o dañar, es posible solicitar otro para sustituirlo. Cuando se usa la extremidad del instrumento para la eliminación, retirar la retención e inclinar el instrumento distal o mesialmente hacia el interior de la prótesis hasta que la retención se desenganche totalmente de la cofia.

Utilice la ranura metálica del extremo posterior del instrumental para retirar la retención negra de la herramienta. Esto se puede lograr deslizando la retención en la abertura del metal y haciendo un movimiento hacia arriba. Cuando se usa la extremidad para la inserción del instrumento, insertar la retención con un ligero ángulo y enderezar el instrumento presionando hacia abajo.

LIMPIEZA

- Desmontar los instrumentos (por ej. el instrumento para la inserción de las retenciones).
- Sumergir completamente los instrumentos en una solución enzimática para la limpieza (mezclada según las instrucciones del fabricante); durante 20 minutos. Fregar los componentes usando un cepillo de nylon con cerdas suaves hasta quitar toda la suciedad.
- Quitar los instrumentos de la solución enzimática y enjuagar con agua corriente durante al menos 3 minutos. Asegurarse de enjuagar bien eventuales orificios del instrumento.
- Si es necesaria una limpieza ulterior poner los instrumentos en una tina de ultrasonidos (con solución enzimática preparada siguiendo las instrucciones del fabricante) asegurándose de que estén totalmente sumergidos, y dejar 10 minutos.
- Quitar los instrumentos de la tina de ultrasonidos y enjuagar durante 3 minutos, asegurándose de enjuagar con la solución usada para la limpieza todos los huecos internos/surcos del instrumento.
- Secar los instrumentos de la humedad residual con un paño seco, limpio y secante.

ESTERILIZACIÓN

Poner los instrumentos en una bolsa aprobado para los ciclos indicados. Todos los componentes y los instrumentos se suministran NO ESTÉRILES. Los abutment de titanio y los instrumentos podrían ser esterilizados en autoclave siguiendo los parámetros siguientes:

	Autoclave por Gravedad	Autoclave en vacío
Temperatura	132°C	132°C
Tiempo de exposición	15 minutos	4 minutos
Tiempo de secado	30 minutos	20 minutos

Para asegurarse de que las retenciones se han esterilizado/desinfectado (es decir, todos los microorganismos incluidos el *Clostridium sporogenes* y las esporas de *Bacillus subtilis* sean eliminadas) se tiene que sumergir las retenciones un mínimo de 3 horas en un líquido de esterilización a temperatura ambiente.

ATENCIÓN: para aquellos dispositivos críticos y sensibles al calor e incompatibles con los métodos de esterilización como los procesos de vapor y gas/plasma a bajas temperaturas, se puede usar una solución química esterilizante siguiendo las instrucciones del fabricante para la esterilización del dispositivo.

DIRECTRICES PARA LA INSERCIÓN, ELIMINACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS SOBREDENTADURAS Para odontólogos y pacientes

Para reducir el desgaste de los abutment LOCATOR R-Tx es importante que los odontólogos y los pacientes lleven a cabo un mantenimiento rutinario en los abutment LOCATOR R-Tx, las cofias y las retenciones.

Es importante que los pacientes comprendan el procedimiento correcto de mantenimiento de la sobredentadura que se debería llevar a cabo en casa para prevenir la pérdida de retención de las retenciones dentro de las cofias. Las directrices siguientes se deberán considerar fundamentales.

POSICIONAR Y QUITAR LA SOBREDENTADURA

Para colocar la sobredentadura, el paciente deberá ser capaz de percibir si está posicionada de manera correcta en los abutment LOCATOR R-Tx antes de empezar a presionar.

El paciente deberá usar las dos manos y simultáneamente presionar hacia abajo en cada lado para enganchar de manera firme la prótesis. El paciente deberá evitar posicionar la sobredentadura usando solamente la boca y a través de oclusión, porque este movimiento supondrá el desgaste impropio de los abutment LOCATOR R-Tx y podría perjudicar la duración de la prótesis.

El paciente deberá quitar la sobredentadura posicionando un dedo debajo de la extremidad izquierda y uno debajo de la extremidad derecha de la sobredentadura y empujando hacia arriba un lado por vez. Una vez quitada la sobredentadura, se recomienda llevar a cabo una limpieza adecuada.

LIMPIEZA DE LA SOBREDENTADURA

El mantenimiento de un estado de higiene oral adecuado es fundamental para el éxito de una sobredentadura, mejora su duración y su correcta funcionalidad.

Análogamente a los dientes naturales, la placa se formará también en la superficie de la sobredentadura. Si no se quita la placa, seguirá acumulándose, por este motivo la sobredentadura se debería quitar y limpiar cada día. Los pacientes deberán respetar estas dos simples pautas para limpiar la sobredentadura.

1 Llenar un recipiente con agua caliente para prevenir cualquier fractura de la sobredentadura. Aplicar detergente en un cepillo con cerdas suaves y limpiar atentamente todas las superficies de la sobredentadura.

2 Cada noche, antes de acostarse, quitar la sobredentadura y sumergirla en una taza con agua limpia y fresca.

PRECAUCIONES ADICIONALES

El incumplimiento del protocolo de higiene por parte del paciente y la falta de un cuidado adecuado de la sobredentadura pueden provocar inflamaciones de la mucosa alrededor de los implantes llevando de esta manera al desarrollo de una peri-implantitis.

A lo largo del tiempo una peri-implantitis puede causar movilidad en el implante y su consiguiente fracaso. Les rogamos que sus pacientes tomen en cuenta las pautas siguientes para cuidar la sobredentadura:

- Evitar el uso de una pasta dentífrica abrasiva para limpiar la sobredentadura. Las partículas podrían arañar la superficie de la sobredentadura, aumentando las posibilidades de acumular placa.
- Masticar tabaco puede causar su depósito en los retenedores y arañar los abutment, reduciendo de manera considerable la su duración, sus características de retención y podría influir en la funcionalidad de los implantes.
- No sumergir la sobredentadura en lejía u otros productos no destinados al uso para la limpieza de las sobredentaduras, ya que dichos productos podrían dañar las características de retención de los retenedores, que podrían a su vez provocar el desgaste de los abutment.
- Si usaran una solución para la limpieza (como Polident® y Efferdent®), les recomendamos que la sobredentadura quede sumergida 15 minutos o menos.
- Cepillar los abutment aumenta su desgaste; si el paciente cepilla sus propios abutment, deberá usar un cepillo con cerdas suaves y acudir a la consulta para controlar periódicamente los procedimientos correctos de mantenimiento de los abutment, de los retenedores y de las cofias.
- No se deberán usar mondadientes ni otros objetos extraños para tocar los abutment.
- No se deberá comer sin la prótesis, ya que la comida podría arañar los abutment y podría llevar al fracaso del implante.
- Se podrán realizar enjuagues bucales con Listerine® y otros colutorios en seguridad sin ningún efecto negativo para los abutment o para los retenedores.
- No se deberá lavar la sobredentadura en el lavavajillas.

RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO DEFECTUOSO Y GARANTÍA

Ofrecer el mejor tratamiento posible al paciente y atenderle en sus necesidades son condiciones necesarias para garantizar el éxito implantológico, por lo que es necesario seleccionar atentamente al paciente, informarlo sobre los riesgos y deberes asociados al tratamiento y alentarle a cooperar con el odontólogo para que el tratamiento llegue a buen fin. Así pues, es necesario que el paciente mantenga una buena higiene, confirmada durante el check-up y consultas de control. Dicha higiene deberá ser asegurada y estar documentada; además, se deberán respetar y documentar las indicaciones y las prescripciones del médico. La garantía cubre únicamente aquellos defectos de fabricación que sean comprobados, previo envío de la pieza junto con el código del artículo y de lote y respetando el plazo de validez de la garantía.

Las cláusulas de garantía están disponibles en la página:

www.sweden-martina.com.



rev. 06-16



ZEST ANCHORS
2061 LOKER AVENUE EAST
CARLSBAD, CA 92010
USA

TEL: 800.262.2310
FAX: 760.743.7975
EMAIL: SALES@ZESTANCHORS.COM
WWW.ZESTANCHORS.COM



Wellkang Ltd
29 Harley St.
W1G 9QR
London U.K.



Para



Sweden & Martina S.p.A.
Via Veneto, 10
35020 Due Carrare (PD), Italy
Tel. +39.049.9124300
Fax +39.049.9124290
info@sweden-martina.com
www.sweden-martina.com