

Ozone

Generador de ozono



Ozone DTA

Generador de ozono

Conocido por sus propiedades antimicrobianas y desinfectantes, el ozono se está empleando de manera interesante en el ámbito médico y odontológico. El ozono desempeña de manera rápida su actividad antimicrobiana, evitando pues, el desarrollo del proceso inflamatorio y fomentando la cicatrización a nivel celular.

Características generales

- En pocos segundos OZONE DTA elimina las bacterias del sitio tratado sin ningún malestar ni dolor para el paciente;
- favorece la cicatrización de las heridas en la fase post-operatoria y la reducción del edema en un plazo sumamente rápido;
- Ozone DTA es un aparato estudiado especialmente para la ozonoterapia en el ámbito médico en áreas limitadas: la concentración de ozono y los tiempos de aplicación se han preestablecido para que el tratamiento médico sea eficaz en total seguridad para el paciente;
- Es fácil de usar, seguro, rápido y se suministra con una serie de sondas de formas diferentes y adecuadas para todas las aplicaciones en odontología.



Campos de aplicación

- desinfección de las bolsas periodontales;
- desinfección de las cavidades;
- desinfección de los conductos radiculares;
- desinfección oral pre y post-operatoria;
- tratamiento de mantenimiento post-extracción;
- tratamiento de la inflamación y desinfección de las heridas y en la fase post-operatoria;
- tratamiento del edema post-operatorio;
- tratamiento de las aftas orales, de lesiones debido a herpes, de la candidiasis oral.

Configuración estándar

Unidad de control, pieza de mano, barra de seguridad, adaptador de potencia, pedal, set de 5 sondas en bandeja autoclavable, manual de uso.

Accesorios opcionales

Sonda #6: punta plana con diámetro ancho específica para el tratamiento de aftas orales y estomatitis en áreas amplias como la superficie lingual o la mucosa de las mejillas.

Air Container: permite mantener dentro de una jeringuilla el ozono producido a partir de la pieza de mano para, posteriormente, inyectarlo directamente en el interior de las bolsas periodontales o conductos radiculares.*



Sonda #1



Sonda #2



Sonda #3



Sonda #4



Sonda #5



Sonda #6



* Las jeringuillas y las puntas ULTRADENT Capillary Tip no son suministradas por Sweden & Martina pero se encuentran fácilmente en el mercado.

Paciente con periodontitis agresiva, edema y presencia de placa y sarro abundante

Amablemente concedido por la Dra. Annamaria Genovesi, Instituto Estomatológico Tirreno, Lido di Camaiore (LU), Italia



Aplicación de ozono antes del tratamiento



2 días después de la aplicación de ozono



Tras el tratamiento full mouth, nueva aplicación de ozono



3 días después del tratamiento

La paciente no ha utilizado sustancias antibacterianas durante todas las fases.

Paciente con presencia de placa y edema importante de los tejidos

Amablemente concedido por la Dra. Annamaria Genovesi, Instituto Estomatológico Tirreno, Lido di Camaiore (LU), Italia



Aplicación de ozono sucesiva a la sesión de higiene



4 días después del tratamiento



código	descripción
OZONEDTA	Generador de ozono con 5 sondas
OZONE203010	Sonda n.1, ángulo 10°, para el tratamiento de gingivitis, 1 pieza
OZONE203011	Sonda n.2, ángulo 50°, para el tratamiento de gingivitis, 1 pieza
OZONE203012	Sonda n.3, plana para el tratamiento de las mucosas, 1 pieza
OZONE203013	Sonda n.4, cónica para terapias alveolares post-extracción, 1 pieza
OZONE203014	Sonda n.5, para el tratamiento de los conductos radiculares, 1 pieza
OZONE203015	Sonda n.6, para el tratamiento de estomatitis en superficies amplias, 1 pieza
OZONE209022	Air container, para el tratamiento de conductos radiculares y bolsas periodontales, 1 pieza
OZONE-H201038	Bandeja autoclavable para sondas



rev. 07-17
v.01



Sweden & Martina S.p.A.

Via Veneto, 10
35020 Due Carrare (PD), Italy
Tel. +39.049.9124300
Fax +39.049.9124290
info@sweden-martina.com
www.sweden-martina.com

Sweden & Martina Mediterranea S.L.

Sorolla Center, Oficina 801
Avda Cortes Valencianas 58, 8pl
46015-Valencia, Spain
Tel. +34.96.3525895
Tel. 900535617
info.es@sweden-martina.com

Sweden & Martina Lda

Av. Miguel Bombarda, 35
1050-161 Lisboa, Portugal
Tel. 800209839
info.pt@sweden-martina.com

Sweden & Martina Ltd - United Kingdom

info.uk@sweden-martina.com

Sweden & Martina Inc. - Distributor for U.S.

info.us@sweden-martina.com

El producto Ozone DTA es un producto sanitario de clase IIa fabricado por APOZA Enterprise co. Ltd (CE 0120), mandatario europeo Denta Tec, Alemania.

Algunos productos podrían no estar disponibles para todos los mercados.

Está prohibido vender, duplicar o divulgar los productos contenidos en este catálogo sin el consentimiento escrito de Sweden & Martina S.p.A.

Para mayor información sobre los productos, incluyendo indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones y potenciales efectos secundarios, remitir a la página web de Sweden & Martina S.p.A.



Todos los contenidos presentes en este catálogo están actualizados. Contactar la empresa Sweden & Martina S.p.A., para las actualizaciones siguientes.