

# YOUSE

Sweden & Martina Group

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A COMPONENTELOR PROTETICE YOUSE YOUSE-I | YOUSE-IL | YOUSE-V | YOUSE VL

### PREMIZĂ

Această linie protetică este concepută pentru a fi utilizată cu implanturi dentare (conexiune hexagonală internă și conexiune conică) din linia YOUSE, produsă de Sweden & Martina S.p.A. Componentele protetice YOUSE trebuie utilizate exclusiv de către personal medical profesionist sau tehnician dentar cu calificările și abilitările necesare.

### COMPONENTE PROTETICE CLASA IIA ȘI CLASA IIB

**BONTURI BAZA DIN TITAN** (tipologia STANDARD sau T-BASE) (realizate din Titanio gr.5). Torque de strângere: 25Ncm

**BONTURI ANGULATE** (realizate din Titanio gr.5). Torque de strângere: 25Ncm

**BONTURI PROVIZORII DIN TITAN** (realizate din Titanio gr.5). Torque de strângere: 25Ncm

**BONTURI CU BILĂ** (realizate din Titanio gr.5). Torque de strângere: 25Ncm

**CANULE CALCINABILE CU BAZA DIN CROM COBALT** (partea calcinabilă realizată din polimer termoplastic, șurub de fixare din titan gr.5, baza în aliaj de crom cobalt). Torque de strângere: 25Ncm

**BONTURI DREPTE SAU ANGULATE PENTRU STRUCTURI** (Realizate din titanio gr.5). Bonturile angulate includ respectivele șuruburi de fixare și tija de înșurubare. Torque de strângere pentru bonturile drepte și angulate: 25Ncm. Torque de strângere al șuruburilor pentru suprastructuri pe bonturi angulate: 15Ncm



0425

### COMPONENTE PROTETICE CLASSE I

**CAPE DE VINDECARE** (realizate din Titan gr.5). Torque de strângere: 10Ncm

**CANULE CALCINABILE INTEGRAL** (realizate din polimer termoplastic). Șurubul de fixare e din titani gr. 5. Torque de strângere: 25Ncm

**SCAN BODY** (realizate din titan gr.4, șurubul de fixare din titani gr. 5). Torque de strângere: 10Ncm

**ANALOG** (realizate din titan gr.5). Pentru a nu induce torsiuni la transferul încorporat în amprentă, se recomandă să se fixeze bine analogul în timpul acestei etape și să nu se strângă excesiv șurubul de blocare.

**TRANSFERURI** (realizate din titan gr.5). Torque de strângere: 10Ncm



### PROCEDURI DE ELIMINARE

Componentele protetice, dacă sunt scoase din cavitatea bucală din cauza unui eșec biologic sau mecanic, trebuie să fie asimilate de șeurilor biologice în scopul colectării și eliminării acestora, conform normelor în vigoare la nivel local.

### AVERTISMENT:

Componentele protetice sunt furnizate NESTERILE. Înainte de utilizare, sterilizați timp de 20 de minute la 134°C; ATENȚIE: Componentele protetice YOUSE sunt dispozitive DE UNICA FOLOSINȚĂ. Nu reutilizați.

### DATELE DE IDENTIFICARE ALE FURNIZORULUI



### LEGENDA SIMBOLURILOR



LOT

REF

MD

Rx Only



[www.sweden-martina.com](http://www.sweden-martina.com)