

YOUSE

Sweden & Martina Group

UPUTE ZA KORIŠTENJE - PROTETSKE KOMPONENTE YOUSE-I | YOUSE-IL | YOUSE-V | YOUSE VL

UVOD

Ova protetska linija dizajnirana je za korištenje sa zubnim implantatima (unutarnji šesterokutni spoj i konusni spoj) linije YOUSE koju proizvodi Sweden & Martina S.p.A. YOUSE protetske komponente smije koristiti samo stručno medicinsko osoblje ili dentalni tehničari s potrebnim kvalifikacijama.

PROTETSKE KOMPONENTE KLASSE IIA I KLASSE IIB

TITAN ABUTMENT (STANDARDNI ili T-BASE tip) (od titana stupnja 5). Moment pritezanja vijka za zaključavanje: 25 Ncm

ABUTMENT POD KUTEM (izrađen od titana stupnja 5). Moment pritezanja vijka za zaključavanje: 25 Ncm.

PRIVREMENI ABUTMENT OD TITANA (od titana stupnja 5). Moment pritezanja vijka za zaključavanje: 25 Ncm.

KUGLIČNI NASTAVAK ZA ABUTMENT (izrađen od titana stupnja 5). Moment pritezanja: 25Ncm

LIJEVANI ABUTMENT S KOBALT-KROM BAZOM (lijevani dio od termoplastičnog polimera, pričvrtni vijak od titana stupnja 5, a baza od kobalt-krom legure). Moment pritezanja vijka za zaključavanje: 25 Ncm.

ABUTMENT ZA DIREKTNO ZAVRTANJE (AV). Ravni i kutni (izrađeni od titana stupnja 5). Kutni abutmenti opremljeni su vijkom za pričvršćivanje i polugom za vijak. Moment pritezanja vijka za zaključavanje ravnih i kutnih AV abutmenta: 25 Ncm. Moment pritezanja vijka za zaključavanje nadogradnje (suprastrukture) na kutnim AV upornjacima (abutmentima): 15 Ncm.

CE
0425

PROTETSKE KOMPONENTE KLASSE I

TRANSMUKOZNI VIJAK ZA ZACJELJIVANJE (od titana stupnja 5). Moment pritezanja vijka za zaključavanje: 10 Ncm.

U POTPUNOSTI LIJEVANI ABUTMENT (izrađen od termoplastičnog polimera). Vijak za zaključavanje je od titana stupnja 5. Moment pritezanja vijka za zaključavanje: 25 Ncm.

TIJELO ZA SKENIRANJE (izrađeno od titana stupnja 4, vijak za zaključavanje od titana stupnja 5). Moment pritezanja vijka za zaključavanje: 10 Ncm.

ANALOG (od titana stupnja 5). Kako se ne bi izazvalo uvijanje transfera ugrađenog u otisak, preporučljivo je držati analog tijekom ove faze i nemojte previše zategnuti vijak za zaključavanje.

TRANSFER (od titana stupnja 5). Moment pritezanja vijka za zaključavanje: 10 Ncm.

CE

POSTUPAK ZBRINJAVANJA

Protetske komponente, ako su uklonjene iz usne šupljine zbog biološkog ili mehaničkog kvara, moraju se tretirati kao biološki otpad i zbrinuti u skladu s važećim lokalnim propisima.

UPOZORENJE:

Protetske komponente isporučuju se NESTERILNE. Prije upotrebe sterilizirajte ih 20 minuta na 134°C.

PAŽNJA: YOUSE protetske komponente su ZA JEDNOKRATNU UPORABU. Nemojte ih ponovno koristiti.

IDENTIFIKACIJA PROIZVOĐAČA



ROIZVOĐAČ

Sweden & Martina S.p.A.
Via Veneto, 10 - 35020 Due Carrare (Padova) - Italy
Tel. +39.049.9124300
e-mail: info@sweden-martina.com
www.sweden-martina.com

LEGENDA SIMBOLA



LOT

REF

MD

Rx Only



www.sweden-martina.com